

このお知らせを該当するユーザーマニュアルに挟んで保管いただくことを推奨いたします。

Smart View または SmartClinic が BSA、CrCl、GFR の計算が実行されない可能性があります。

製品：Smart View または SmartClinic および MOSAIQ®

日付：2024 年 10 月

参照番号（フィールドチェンジオーダー、FCO）：371-05-MSQ-081

フィールドコレクティブアクション(FCA)番号（該当する場合）：該当なし

関連先：SVJ-11230、SVJ-11470、SVJ-11471

このドキュメントには、Elekta グループの機密情報および専有情報が含まれており、これらの情報はこのドキュメントを受け取った人のみが使用できます。このドキュメントは著作権保護の対象であり、Elekta の書面による許可のない本ドキュメントの配信、配布、または複製は固く禁じられています。

SVJ-11230：

適用範囲：	Smart View または SmartClinic を使用する MOSAIQ 3.0 以降
説明：	アセスメントに GFR 値が含まれ、患者の身長、体重、クレアチニン、BUN、およびシスタチン C が Smart View または SmartClinic に入力されている場合、[Save (保存)] をクリックするとエラーが発生し、GFR (Schwartz)、GFR (CKD-EPI)、GFR (シスタチン) の計算ができないことがあります。この場合、MOSAIQ は最後に計算した GFR 値に戻ります。
解決策：	エラーメッセージを確認し、GFR が Smart View または SmartClinic で計算されていないことを確認したら、GFR 計算の値を MOSAIQ に直接入力して下さい。 この問題は、将来の Smart View リリースで解決される予定です。
テクニカルリファレンス：	該当なし
お問い合わせ先：	この通知についてご質問等ございましたら、担当の Elekta Care サポートセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

SVJ - 11470

適用範囲：	Smart View または SmartClinic を使用する MOSAIQ。
説明：	身長および体重を含むようにアセスメントビューが設定されていますが、BSAが除外されている場合、Smart View または SmartClinic で身長と体重を入力しても BSA の計算は実行されません。MOSAIQ は、最新の既知の計算済み BSA 値を使用します。
解決策：	Smart View または SmartClinic で身長と体重を入力する場合は、アセスメントビューに BSA が含まれていることを確認してください。 この問題は、将来の Smart View リリースで解決される予定です。
テクニカルリファレンス：	該当なし
お問い合わせ先：	この通知についてご質問等ございましたら、担当の Elekta Care サポートセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

SVJ - 11471

適用範囲：	Smart View または SmartClinic を使用する MOSAIQ。
説明：	翻訳されている Smart View または SmartClinic を使用すると、患者に性別が登録されているにも関わらず、性別が必要な CrCl 値と GFR 値に「性別の未入力」エラーが発生することがあります。このような場合、MOSAIQ は以前に計算した CrCl 値と GFR 値をデフォルトとして計算します。
解決策：	エラーメッセージを確認し、CrCl または GFR が Smart View または SmartClinic で計算されていないことを確認したら、CrCl または GFR 計算の値を MOSAIQ に直接入力して下さい。 この問題は、将来の Smart View リリースで解決される予定です。
テクニカルリファレンス：	該当なし
お問い合わせ先：	この通知についてご質問等ございましたら、担当の Elekta Care サポートセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。